



フッ素入り歯面研磨ペースト

ジーシー PTCペースト ルシェロ ホワイト

包装・希望医院価格●1函：1本=¥2,400

一般医療機器 13B2X00124000003

特許出願中

成分●炭酸カルシウム(Lime粒子®)、ポリエチレングリコール400、モノフルオロリン酸ナトリウム、濃グリセリン、パラベン、黄色4号、青色1号、香料(グリーンシトラス)、その他

内容量●80g

○製造販売元 日本ゼトック株式会社
東京都新宿区西新宿1丁目26番2号



ジーシー PTCペースト ルシェロ ホワイト

フッ素入り歯面研磨ペースト

関連製品



歯面清掃用ブラシ

ジーシー PTCブラシ

包装・希望医院価格

●1函：ブラシNo.1 20個=¥2,300

一般医療機器 13B1X00155000103



NEW

歯面清掃用カップ

ジーシー PTCカップII

包装・希望医院価格

●1函：カップII 20個=¥1,000

一般医療機器 13B1X00155000291



歯面清掃用コーン

ジーシー PTCコーン

包装・希望医院価格

●1函：コーンNo.1 20個=¥1,200

一般医療機器 13B1X00155000104



歯面清掃用歯間ブラシ

ジーシー PTC 歯間ブラシ

包装・希望医院価格

●1函：ブラシサイズM 20本=¥1,600



歯面清掃器材用アタッチメント

ジーシー PTC マンドレル

包装・希望医院価格

●1函：マンドレル 10本=¥2,150

一般医療機器 13B1X00155000101



アメリカンイーグルインストルメント

シックルスケーラー

M23
M23T

ブレード

●2種=ステンレススチール、XPシリーズ

※M23TはXPシリーズのみ

ハンドル

●3/8インチ イーグルライト(X)

包装・希望医院価格

●ステンレススチール 1本=¥3,630

●XPシリーズ 1本=¥5,900

スケーラー 一般医療機器 13B1X00155000070

XPスケーラー 一般医療機器 13B1X00155000263

前歯部・白歯部の両方に使いやすい屈曲のシックルスケーラー。M23Tのブレードは、M23より薄い(T:THIN【薄い】)タイプです。

歯面に優しく、ステイン除去



white
ruscello
PTC PASTE

2018年度 GC友の会

歯科衛生士会員の皆さまに
本製品(友の会仕様)をお届け
しております!

詳しくはこちらへ



他にも様々な特典をご用意しております

<http://www.gcdental.co.jp/tomo/tomonokai/>

「ルシェロフロス」があなたのPTCを効果的にサポート!

マイクロファイバー(極細繊維)の応用により実現した高いブラーク除去能力。特にアンワックスタイプはPTCに最適。

デンタルフロス **ルシェロフロス**
(アンワックス/ミントワックス)

内容量●30m
ケース色●アンワックス：1色=ホワイト/ミントワックス：4色=ピンク、グリーン、イエロー、パープル
包装・希望医院価格●アンワックス 1函：6個人=¥1,500 / ミントワックス 各色1函：6個人=各¥1,500
包装・希望患者価格●1個=各¥320(税込)
【医院用】内容量●200m ケース色●アンワックス：1色=ホワイト/ミントワックス：1色=ピンク
包装・希望医院価格●アンワックス 1個=¥1,100 / ミントワックス 1個=¥1,100

※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。
※掲載の価格とジーシー研究所測定値の参考データは、2017年10月現在のものです。
※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。

ご使用に際しましては、必ず使用上の注意事項をお読みください。

発売元 **株式会社 ジーシー**

東京都文京区本郷3丁目2番14号

DIC(デンタルインフォメーションセンター)

お客様窓口 ☎0120-416480

受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祭日を除く)

<http://www.gcdental.co.jp>

支店

●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333

営業所

●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722

●東北(022)207-3370 ●九州(092)441-1286

PA107M1709

「PTCペースト ルシェロ ホワイト」は ステインを浮かし優しく除去します

その秘密は、清掃剤「Lime粒子®」を高濃度に配合した弱アルカリ性のペースト。歯に沈着したステインを浮かし、「Lime粒子®」が効率よく優しくステインを除去します。




特長1 すぐれたステイン除去力 弱アルカリ性×Lime粒子®

ペーストを弱アルカリ性にするにより、ステインを浮かせやすくします。次に浮かしたステインを清掃剤「Lime粒子®」が効率よく除去してくれます。


擬似ステインを用いた除去力試験

pHの違いによる擬似ステイン除去の比較試験

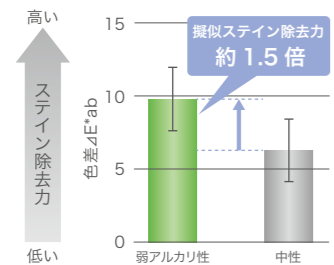

試験用にpH調整したPTCペーストは、弱アルカリ性の方が中性よりもステイン除去力が高いことがわかります。

自社既存製品との比較試験

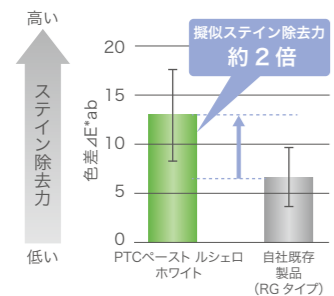

PTCペースト ルシェロ ホワイトは、自社既存製品と比較してステイン除去力が高いことがわかります。

<ジーシー研究所データ>

ステイン除去のメカニズム(イメージ図)




特長2 低侵襲

清掃剤「Lime粒子®」は、歯面に優しくPTCすることができます。

モース硬度からみたLime粒子®と歯質の硬さの目安



清掃剤顕微鏡画像

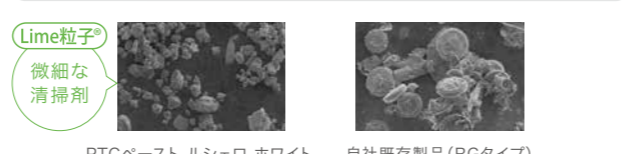

特長3 PTCに最適なペースト性状

柔らかいソフトペーストのため、ブラシやカップでの操作でも飛び散りにくく、狙った部位を効率よくクリーニングします。口中に広がるグリーンシトラスの香りで気持ちよく、口腔内が爽快になります。



プロフェッショナルケアで、歯を白く美しく

ケース1



患者さんは紅茶を愛飲しており、歯面に着色があります。



PTC用ブラシとPTCペースト ルシェロ ホワイトで着色を除去します。



歯間部についた着色まで、しっかり除去できます。



短時間で効率よく!

ケース2



下顎前歯全体が飲食により着色があります。



PTC用ブラシとPTCペースト ルシェロ ホワイトで大まかに着色を除去します。



ブラシだけでは落としにくい部分の着色は、スケーラーを使い除去します。



着色と共にくすみも取れ、歯面全体の明度も上がり患者さんも美白を実感していただけました。

PTCペースト ルシェロ ホワイトの効果的な使用方法



プロケア×セルフケアで美白効果を持続

プロケアによる美白効果を持続するために、セルフケアには「ルシェロ ホワイト シリーズ」がおすすめです。

輝き続ける白い歯に

ルシェロ 歯みがきペースト ホワイト 4つの力

- 弱アルカリ性 (汚れを落としやすくする)
- Lime粒子® (歯にやさしい)
- PEG400 (薬用成分)
- フッ素 (薬用成分)

患者さんのセルフケアには「ルシェロ歯みがきペースト ホワイト」「ルシェロ歯ブラシ W-10」をおすすめください。

ルシェロ歯みがきペースト ホワイト

【包装・価格】
希望医院価格○1本=¥1,430
希望患者価格○1本=¥1,940(税込)
【内容量】100g <薬用ハミガキ>

【医薬部外品】
○製造販売元 日本ゼトック株式会社
東京都新宿区西新宿1丁目26番2号

【成分】[清掃剤]炭酸カルシウム(Lime粒子®)[溶剤]精製水[湿潤剤]濃グリセリン[薬用成分]ポリエチレングリコール400、モノフルオロリン酸ナトリウム(フッ素)[甘味剤]キシリトール[粘結剤]ヒドロキシエチルセルロース、カルボキシメチルセルロースナトリウム[香料剤]香料(ビュアミントタイプ)[pH調整剤]リン酸水素二ナトリウム、水酸化ナトリウム[増粘剤]無水ケイ酸[保存剤]パラベン

ルシェロ歯ブラシ W-10

【包装・価格】
●6本1箱:
希望医院価格○1箱(各色3本)=¥1,920
希望患者価格○1箱(各色3本)=¥2,400(税込)
●1本:希望患者価格○1本=¥400(税込)
※ラバー1色=ホワイト

【色調】2色=パールホワイト、パールゴールド
※ラバー1色=ホワイト

【毛のかたさ】やわらかめ

【特許出願中】

ruscello
ルシェロシリーズの
詳しい情報はこちら
<http://www.gcdental.co.jp/ruscello/>